

LOLé 1: Einbauen des Upgrade Kits


V. April 2013



Stellen Sie sicher, dass die OP-Lampe nicht an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist!

1-

Der Lampenkopf kann vom Arm abgenommen werden. Dies ist aber keine Pflicht. Nehmen Sie die Griffe vorsichtig ab, indem Sie waagrecht nach Außen ziehen.

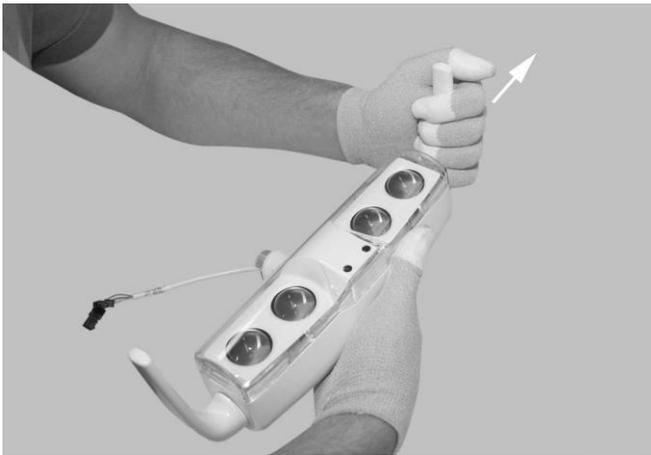


3-

Nehmen Sie die Abdeckkappe und die Vordermaske ab.

4-

Schneiden Sie die 3 Ringe auf.

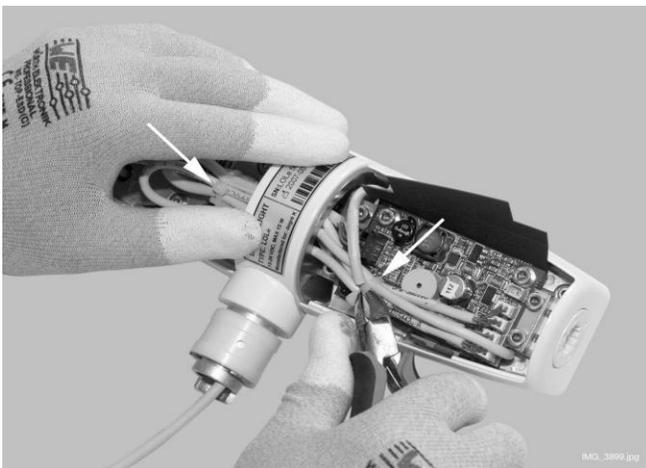

2-

Entfernen Sie die hinteren Abdeckungen, wie in der Abbildung.

Lockern Sie die Abdeck- Sperre mit einem kleinen Inbusschlüssel durch Druck, auf. Nehmen Sie die Abdeckungen ab.




5-

Merken Sie sich die genaue Kontakt-Position bevor Sie die Opteled- Kabeln von der elektronischen Platine abtrennen.

6-

Schrauben Sie die Platine von dem Sockel auf, indem Sie die 3 Schrauben mit einem 3mm Inbusschlüssel aufdrehen.

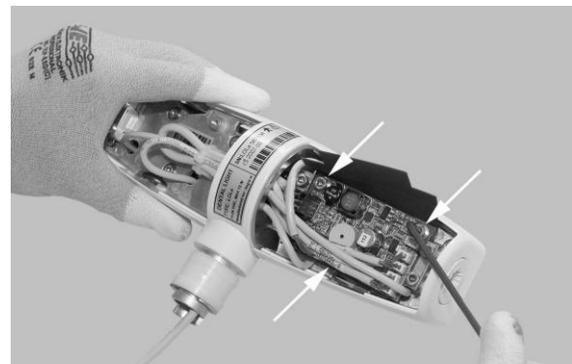


degréK

www.degrek.com

7-

Die 2 Schrauben, die jedes Opteled festhalten, mit einem 2,5mm Inbusschlüssel, aufschrauben.

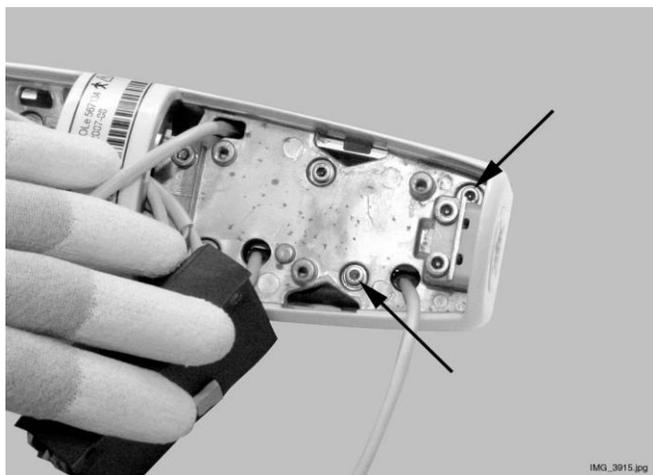

8-

- Entfernen Sie das ursprüngliche Opteled und
- setzen Sie das neue Opteled ein.



Eins nach dem Anderen.




**In steigender Reihenfolge, den
Seriennummern nach!!**



degréK

www.degrek.com

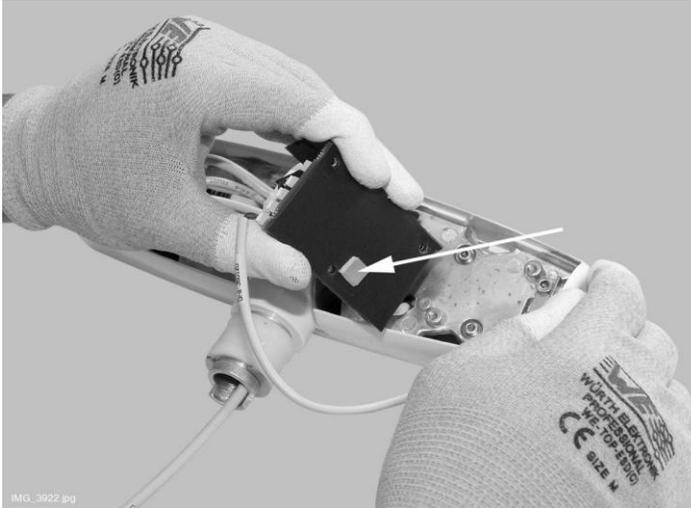


Achtung:
Die Schrauben gut festschrauben ohne sie aber dabei zu forcieren!

Stellen Sie sicher, dass das Wärme-Kontaktplättchen, beim Anschließen der Platine an das Isolierblatt an den Lampenkopf, richtig am Isolierblatt ist.

9-
Bringen Sie die hinteren Abdeckungen und die Lampengriffe an.
Falls der Lampenkopf von dem Arm getrennt wurde, montieren Sie ihn wieder an den Arm, indem Sie der LOLé 1 Anleitung folgen.
Bringen Sie die Maske und die Griffe an.


Lichrfleck auf Zielscheibe der up-gegradeten LOLé 1:

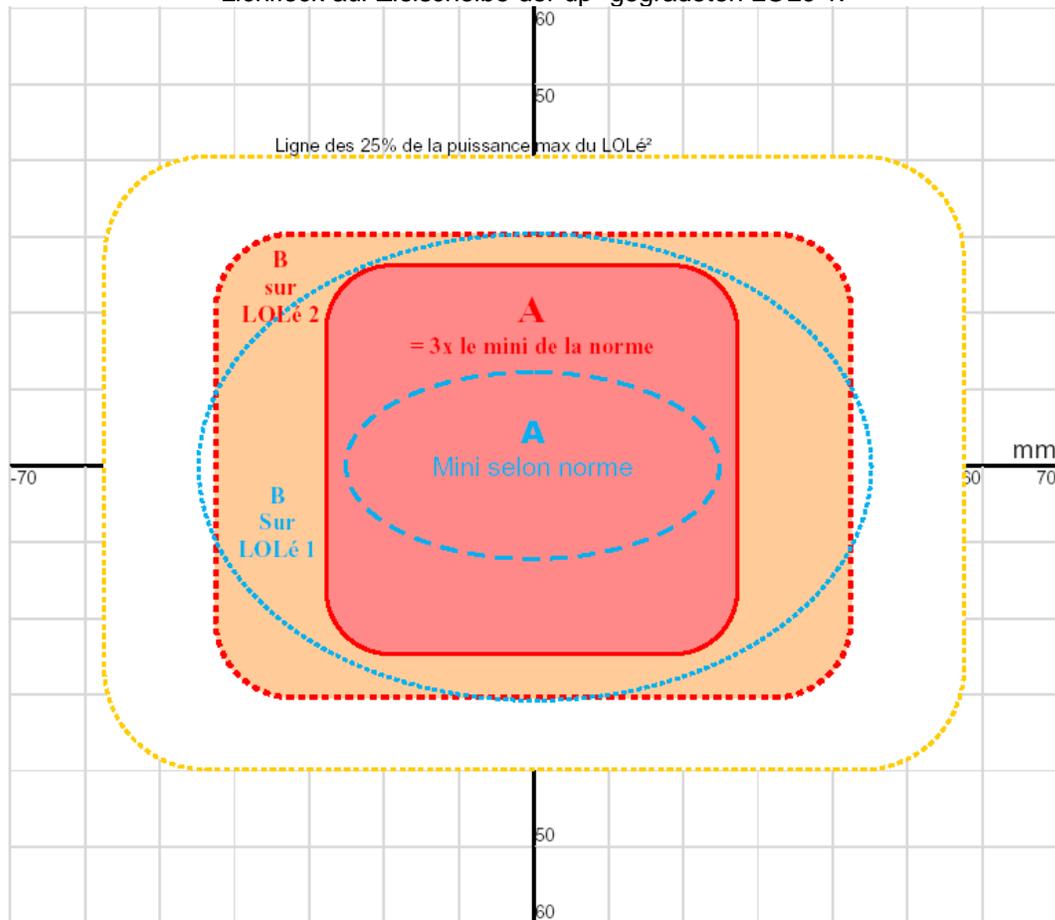


➔ Die Ausrichtung der Opteleds einrichten

- ⇒ Die Form und die Verteilung des Lichts der LOLespot durch die Einstellung der Überlagerung von jeden Spot optimieren: der Spot der LOLe ist von der Überlagerung von die 4 Spot des Opteleds erhalten.

1- Die Ernährung der LOLekopf abzweigen und anschalten.
Das Licht auf eine homogene und plane Fläche richten. Die Fläche soll 70cm weit sein
Die Beleuchtungsfelder der 4 Opteleds sollen auf dieselbe Höhe sein.
Andernfalls, kann man die vertikale Opteledstellung einstellen.

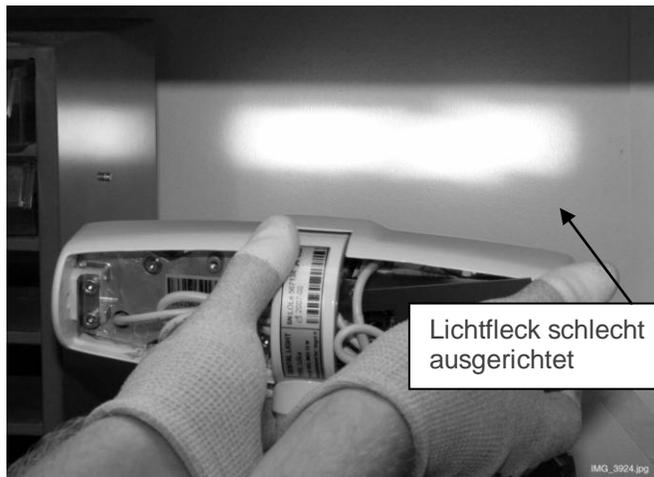

2- Die Schrauben auf den Opteled mit einem Inbus 2.5mm ein bisschen abschrauben und den Opteled in der richtigen Lage ausrichten.

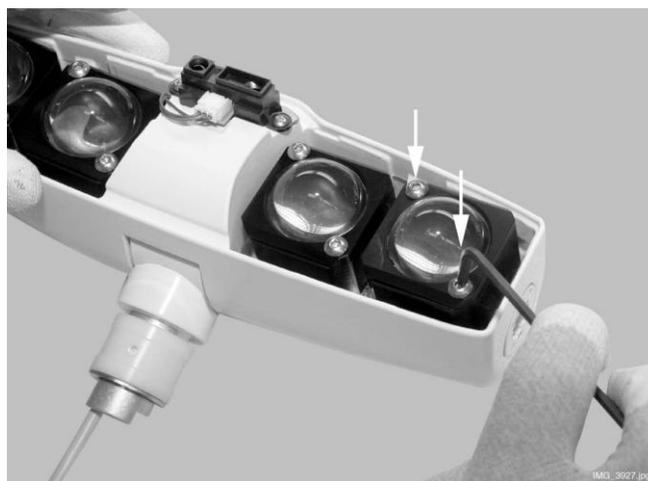

3- die Schrauben nachziehen und den Beleuchtungspot nachprüfen.



4- Das Gerät ausmachen. Die Vordermaske und den Schutz zurückstellen.