

LOLé 2 – Changement d'opteled

Panne concernée : 1, 2, 3 ou 4 systèmes LED sont jaunes :

1x Opteled = ensemble-bloc de 2 systèmes opticoLED



Changement de 1x Opteled :

1 ou 2 LED jaunes du même côté



Changement de 2x Opteled :

1 LED jaune au moins de chaque côté. Par ex :





Synthèse :

- 1- Retirer la visière et le cache
- 2- déconnecter et démonter le/les optelede(s) défectueux
- 3- remonter et reconnecter le/les optelede(s) (*ne pas sur-serrer les vis !*)


4- Procéder à l'alignement des optelede(s).

- allumer la lampe et placer une feuille blanche à 30/40 cm >> 4 taches distinctes
- **Aligner les 4 taches** >> corriger la hauteur de l'opteled de droite, en jouant sur ses vis.

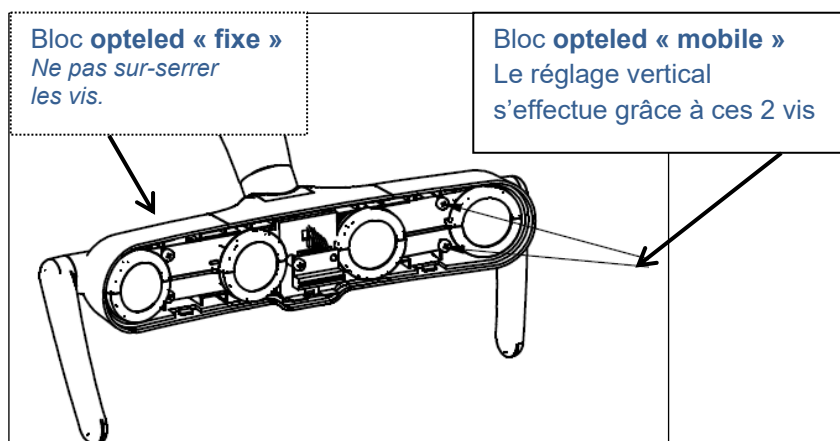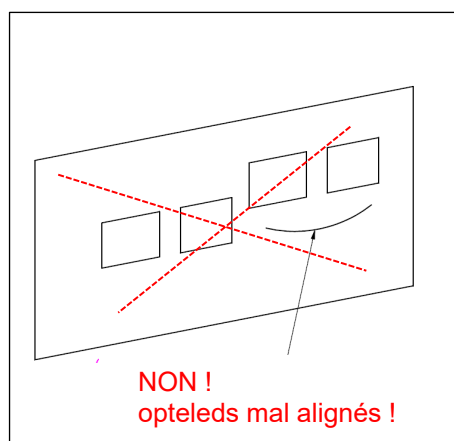

LOLé 2 : Remplacement d'un opteled

Opteled = ensemble-bloc de 2 LED + lentilles optiques

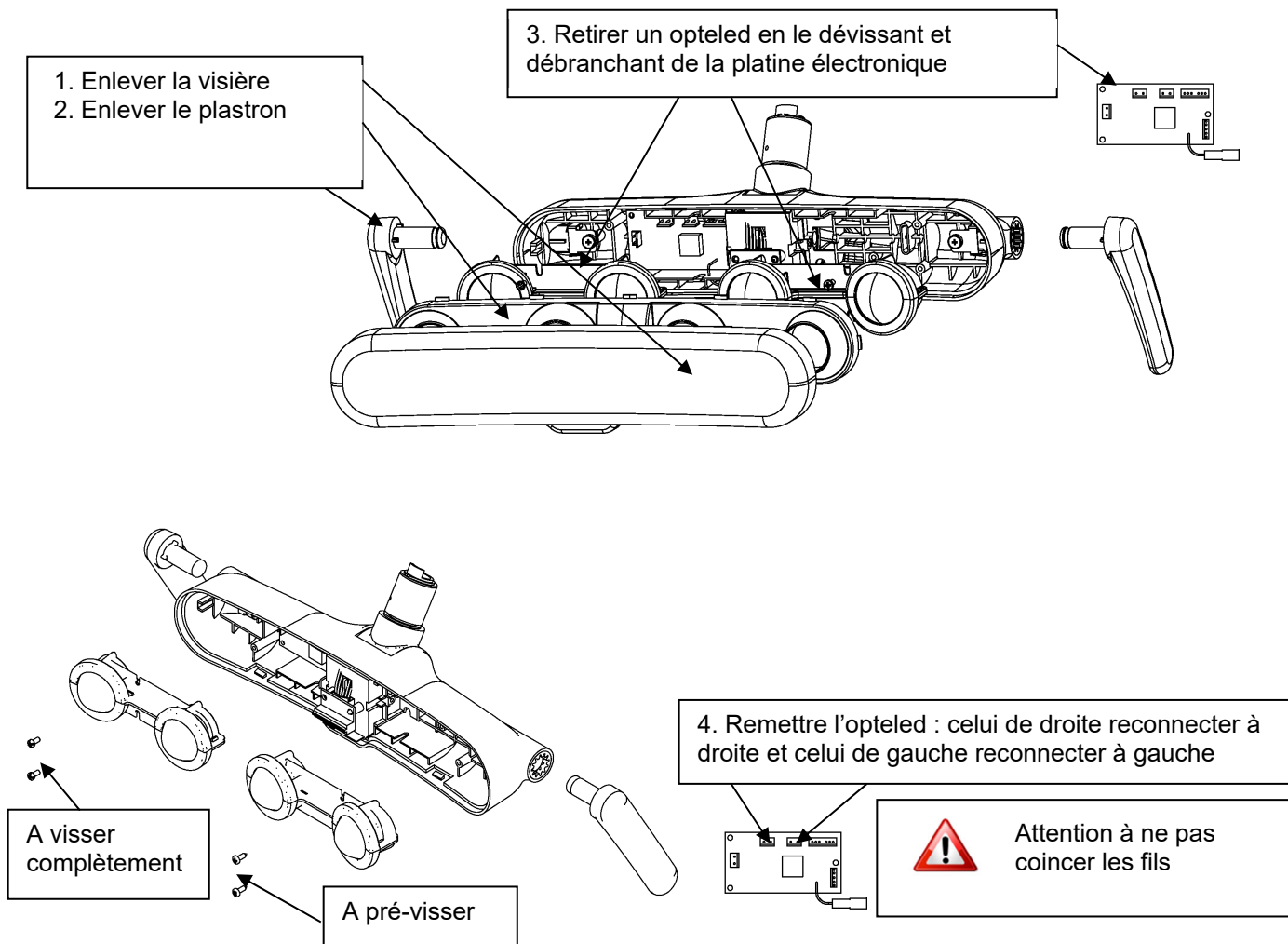

Alignement des OPTILED


Opteled = ensemble-bloc de 2 LED + lentilles optiques

Vérifier que les opteled sont bien réglés.


Après avoir remonté les opteled, allumer la lampe et placer une feuille blanche à 30/40 cm.

⇒ Apparaissent 4 taches distinctes qui doivent être **alignées**.

Dans le cas contraire (voir dessin), il est nécessaire de corriger la hauteur de celle de droite seulement en jouant sur les vis de l'opteled.

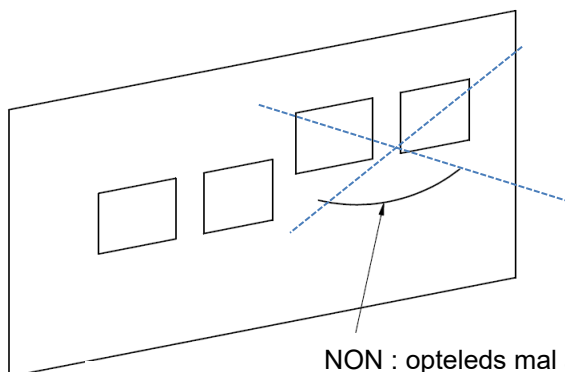

Bloc **opteled « fixe »**
Ne pas sur-serrer les vis.

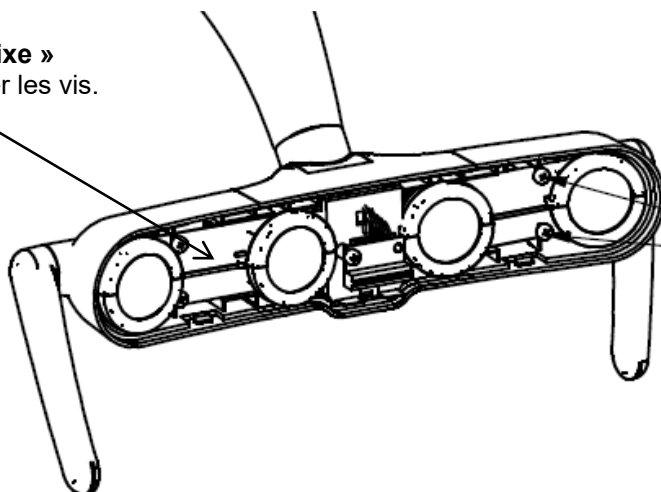

Bloc **opteled « mobile »**
Le réglage vertical
s'effectue grâce à ces 2 vis

En remettant le plastron en place,
veillez à ce que le bargraph soit
visible dans la fente.

