

## LOLé 2 – Changement d’opteled

Panne concernée : 1, 2, 3 ou 4 systèmes LED sont jaunes :

1x Opteled = ensemble-bloc de 2 systèmes opticoLED  
Réf : LO2-OPTILED-2



### Changement de 1x Opteled :

1 ou 2 LED jaunes du même côté. Par ex. :

Par ex. :



### Changement de 2x Opteled :

1 LED jaune au moins de chaque côté. Par ex. :



1- Retirer la visière et le cache

2- déconnecter et démonter le/les opteleds défectueux

3- remonter et reconnecter le/les opteleds (*ne pas sur-serrer les vis !*)

### 4- Procéder à l’alignement des opteleds.

- allumer la lampe et placer une feuille blanche à 30/40 cm >> 4 taches distinctes
- **Aligner les 4 taches** >> corriger la hauteur de l’opteled de droite, en jouant sur ses vis.

